

Hydroliq AIR *Ultrasonic*

Oberflächen- und Raumdesinfektion



Wasserbasierende Oberflächen- und Raumdesinfektion

- ~ viruzid, bakterizid, fungizid
- ~ Dermatest "SEHR GUT"
- ~ gelistet bei BAG / BAUA
- ~ ohne Ethanol und ohne synthetische Zusatzstoffe
- ~ hinterlassen keine ätzenden Rückstände
- ~ neutralisieren alle bakteriellen Gerüche
- ~ hitze- und kälteresistent
- ~ benötigen keine Gefahrenhinweise

Produktbeschreibung

Hydroliq AIR *Ultrasonic* ist ein elektrochemisch verändertes Wasser, ohne synthetische Zusatzstoffe. Durch diesen Herstellungsprozess entstehen Produkte, welche die Fähigkeit besitzen, 99.99% aller Bakterien, Viren, Keimen, Sporen und Pilzen innert Sekunden zu eliminieren.

Aus einer Wasser-/Kochsalz-Lösung (Natrium Chlorid) wird mittels Chlor-Alkali-Elektrolyse eine pH-neutrale, für Mensch und Umwelt völlig ungefährliche Desinfektionslösung gewonnen, welche äusserst stabil ist (garantiert 12 Monate nach dem Öffnen).

Einzigartige Hygienetechnologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen Raum- oder Flächendesinfektionsmitteln hinterlassen die Lösungen von Hydroliq Pure Water Solutions keinerlei ätzende Rückstände und beschädigen so keine Materialien bei der Desinfektion. Die behandelten Oberflächen und Räume können unmittelbar nach oder sogar während der Desinfektion von Personen benutzt werden.

Da kein Alkohol verwendet wird und durch die gute Hautverträglichkeit trocknet die Haut der Anwender dabei nicht aus, wodurch ein Eindringen von Keimen in rissige Hautstellen verhindert werden kann.

Hydroliq AIR *Ultrasonic* bietet ein grosses Wirkungsspektrum und bekämpft die Mehrheit aller Keime, welche an Oberflächen haften:

- ~ **viruzid**
HBV, HCV, HIV, Influenza, Coronaviridae
- ~ **bakterizid**
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
- ~ **fungizid**
Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

Einsatzgebiete

Hydroliq AIR *Ultrasonic* kommt in sämtlichen hygienerelevanten Bereichen zum Einsatz:

- ~ Einrichtungen des Gesundheitswesens
- ~ Bildungseinrichtungen
- ~ Büroinfrastruktur
- ~ Verkaufsflächen
- ~ Gastronomie
- ~ Hotellerie
- ~ Reception
- ~ Kosmetikstudios
- ~ Privater Bereich

Hydroliq AIR *Ultrasonic*

Oberflächen- und Raumdesinfektion



Anwendung

Gebrauchsfertige Mischung zur Raumdesinfektion (nicht poröse Flächen) im Privatbereich, im öffentlichen Gesundheitswesen, in Schwimmbädern sowie im Lebens- und Futtermittelbereich, etc. Anwendung durch feinen Sprühnebel. Vor der Desinfektion ist eine Reinigung der Flächen erforderlich. Eine genügende Menge verwenden, damit die behandelten Flächen während der ganzen Einwirkdauer bedeckt bleiben. Für den beruflichen und privaten Gebrauch.

Anwendungsbereiche	Dosierung	Einwirk-zeit
Viruzid (HBV, HCV, HIV, Influenza, coronaviridae)	unverdünnt	2 min.
Bakterizid (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa)	unverdünnt	1 min.
Fungizid (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis)	unverdünnt	1 min.

Zertifizierung

Hydroliq AIR *Ultrasonic* wurde von Dermatest dermatologisch getestet und für "SEHR GUT" befunden.

Hydroliq AIR *Ultrasonic* ist Halal zertifiziert.

Verpackungseinheiten

Grösse	Artikelnummer	Inhalt
Hydroliq AIR <i>Ultrasonic</i> 5000ml	HydroAirU0305	96 Stück/ Palette
Hydroliq AIR <i>Ultrasonic</i> 500L	HydroAirU030500C	
Hydroliq AIR <i>Ultrasonic</i> 1'000L	HydroAirU0301000C	



Zusammensetzung

Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure

Physikalische und chemische Daten

Das Produkt ist nicht brennbar.

Internationale Richtlinien

Das Verfallsdatum dieses Produktes ist auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nach diesem Datum nicht mehr.

Gehen Sie mit Bioziden vorsichtig um. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

BAUA: N-96279

BAG: CHZN6380

Lagerung / Aufbewahrung

Lagern Sie das Produkt gut verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Licht und Hitze schützen.

Haltbarkeit

Die folgende Haltbarkeitsdauer sollten bei der Verwendung von Hydroliq AIR *Ultrasonic* beachtet werden:

ab Produktionsdatum	24 Monate
in geöffnetem Zustand, jedoch gut wiederverschlossen oder bei Verwendung mit einer Dosierpumpe / Dispenser	12 Monate